

Набор тест-полосок Wellion Gluco Calea



фиксируют уровень глюкозы в капиллярной цельной крови всего за несколько секунд и требуют малое количество крови для проведения измерения.

Созданы три уникальных чип-кода для проведения измерений отдельно у кошек, собак и лошадей с целью получения более точных результатов (Кодирование по цвету). Это позволяет избежать ошибок во время измерения, которые возникают вследствие неправильного кодирования. Результаты тестирований калибруются по плазме для легкого сравнения с лабораторными анализами. Окно управления тест-полоски должно быть полностью заполнено образцом крови и тогда Вы получите точные и надежные результаты.

ВАЖНО:

- Использовать тест-полоски для измерения уровня глюкозы в крови Wellion GLUCO CALEA только с глюкометром Wellion GLUCO CALEA.
- Тест-полоски Wellion GLUCO CALEA чувствительны к влаге и свету, поэтому очень важно плотно закрывать крышечку флакона с тест-полосками после каждого использования. Нельзя оставлять тест-полоски вне флакона, если они не используются.

Для прибора Wellion GLUCO CALEA разработаны три уникальных чип-кода для проведения измерений отдельно у каждого вида животных: кошек, собак или лошадей. Поэтому всегда нужно использовать соответствующий чип-код, который находится в упаковке с тест-полосками, для получения точных результатов тестирований для оптимизации лечения сахарного диабета у Вашего питомца. Невозможно провести измерение уровня глюкозы в крови глюкометром без чип-кода. Если Вы начинаете использовать новую упаковку тест-полосок, Вам нужно будет ввести чип-код, соответствующий виду Вашего животного.

ВАЖНО:

- Проверьте срок годности, указанный на флаконе с тест-полосками и на упаковке. Не используйте тест-полоски с истекшим сроком годности.
- Используйте тест-полоску сразу же после того, как достали ее из флакона.
- Не используйте мокрые или поврежденные тест-полоски.
- Храните вдали от прямых солнечных лучей и тепла. Храните флакон с тест-полосками в сухом, прохладном месте. Температура хранения тест-полосок 4°C — 30°C.